

เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร Yuwell 8F-5AW

คุณสมบัติ

1. หน้าจอ LCD แสดงเวลาการทำงาน และเวลาตั้งปิด
2. ตั้งเวลาใช้งานสูงสุดได้ 2 ชั่วโมง มีไฟบอกสถานการณ์ทำงาน และมีสัญญาณเตือน
3. ความดันขณะทำงาน 52 เดซิเบลเอ
4. สามารถต่อชุดพ่นยาได้ โดยให้อัตราการพ่นยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.15 มล./นาที่
5. อัตราการไหลของออกซิเจน 0-5 ลิตร/นาที่ ความเข้มข้นของออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 95.5% ±3%
6. ความดันออกสูงสุด 40-70 kPa มีกลไกการลดความดันที่ 250 kPa ± 25kPa
7. กำลังไฟ 400 วัตต์ ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2%
8. ใช้ได้ถึงความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,828 เมตรโดยไม่ทำให้ความเข้มข้นลดลง
9. แต่ที่ระดับความสูงเกิน 1,828-4,000 จะให้ระดับความเข้มข้นออกซิเจนต่ำกว่า 90%
10. มีระบบรักษาความปลอดภัยหากระบบทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง เครื่องจะดับอัตโนมัติ

รายละเอียด

ขนาดเครื่อง 39 x 24.5 x 50 เซนติเมตร
น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม

อุปกรณ์ในกล่อง

ชุดหน้ากากให้ออกซิเจน	1	ชุด
ชุดสำหรับพ่นยาละอองยา	1	ชุด
ข้อต่อสายให้ออกซิเจน	1	ชิ้น
สายให้ออกซิเจนทางจมูก	2	เส้น
กระบอกน้ำทำความชื้น	1	ชิ้น
สายต่อกระบอกน้ำ	2	เส้น
ไส้กรองอากาศสำรอง	1	ชิ้น
รีโมท พร้อมถ่าน	1	ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	1	ชุด

YUWELL 8F-5AW



062-424-9614
Line : @siammedical

บริษัท สยามเมดิคอล อิมพอร์ต จำกัด

คำเตือน

1. ผู้ที่จะใช้เครื่อง ได้ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
2. ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะหาปริมาณออกซิเจนเข้มข้น แต่ ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต กรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจอันตรายได้ ดังนั้นควรรักษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน
3. เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ กระจกไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซในเครื่องออกไซด์เพื่อใช้ในการทดสอบ
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ในบริเวณใกล้กับตัวเครื่องขณะที่มีการเปิดใช้งาน

วิธีการดูแลรักษา

ทำความสะอาดไส้กรอง ทุก 1 เดือน หรือเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน

ควรเปลี่ยนน้ำในกระบอกให้ความชื้นทุกวัน

ควรใส่น้ำสะอาดที่ผ่านการต้ม หรือน้ำกลั่นทางการแพทย์ ในกระบอกให้ความชื้น

ดูแลความสะอาดปลายท่อที่ต่อเข้ากับกระบอกให้ความชื้น

ควรทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่อง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ควรตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่โล่ง, ที่ให้ลมผ่านสะดวก และควรวางห่างจากกำแพง อย่างน้อย 1 ฟุต

การเปิดปิดเครื่องแต่ละครั้ง ควรเว้นระยะเวลาให้เครื่องเซทไฟอย่างน้อย 5 นาที

หลีกเลี่ยงการวางหรือติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่น หรือมลพิษเยอะ

คำแนะนำ

ควรมีท่อออกซิเจนสำรอง ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่เครื่องติดตั้งอยู่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือฝุ่นเยอะ

ควรพักเครื่อง 15-30 นาที ทุกการใช้งานครบ 12 ชั่วโมง แล้วเปิดใช้งานต่อ เพื่อเป็นการถนอมเครื่อง

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้



SIAM MEDICAL IMPORT