

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 8 ลิตร YUWELL 7F-8W

คุณสมบัติ

1. ขนาดเครื่องผลิตออกซิเจน 44.5*37.2*68 ซม. น้ำหนัก 27.5 กิโลกรัม
2. มีหน้าจอแสดงเวลาการทำงานของตัวเครื่อง
3. ช่วงอัตราการไหล 1-8 ลิตรต่อนาที
4. ความเข้มข้นออกซิเจน 90%++ และแรงดันสูงสุด 45-4.5 kPa
5. เครื่องผลิตออกซิเจนมีกลไกการลดความดันที่ 250 KPa +- 25 KPa
6. สามารถใช้ได้ถึงระดับสูง 1828 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลง
7. ความดังขณะทำงาน 60 เดซิเบล
8. ใช้ไฟฟ้า (ไฟบ้าน) 220V 50Hz กำลังไฟเข้าไม่เกิน 350 VA
9. มี Exceed press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
10. มีระบบแจ้งเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า หรือเมื่อระดับออกซิเจนต่ำ และ ความดันต่ำหรือความดันสูง
11. คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของ คอมเพรสเซอร์ และตัวเครื่องผลิตออกซิเจน

วิธีการดูแลรักษา

1. ควรทำความสะอาดไส้กรองข้างเครื่องผลิตออกซิเจนทุกสัปดาห์ โดยล้างน้ำและผึ่งลมให้แห้ง
2. ควรเปลี่ยนไส้กรองในเครื่องผลิตออกซิเจนอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
3. ควรเปลี่ยนน้ำในกระบอกให้ความชื้นทุกวัน
4. ควรใส่น้ำสะอาดที่ผ่านการต้ม หรือน้ำกลั่นทางการแพทย์ ในกระบอกให้ความชื้น
5. ดูแลทำความสะอาดปลายท่อที่ต่อเข้ากับกระบอกให้ความชื้น
6. ควรทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่อง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. ควรตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่โล่ง, ที่ให้ลมผ่านสะดวก และควรวางห่างจากกำแพง อย่างน้อย 1 ฟุต
8. การเปิดปิดเครื่องแต่ละครั้ง ควรเว้นระยะเวลาให้เครื่องเซ็ทอัพอย่างน้อย 5 นาที
9. ก่อนใช้ฟังก์ชันพ่นยาต้องปรับระดับอัตราการไหลของออกซิเจนเป็น 0 ลิตรต่อนาที ก่อนทุกครั้ง
10. หลีกเลี่ยงการวางหรือติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่น หรือมลพิษเยอะ
11. การใช้งานสามารถใช้ต่อเนื่องได้ 22 - 24 ชั่วโมง ควรพักเครื่อง 20-30 นาที

YUWELL 7F-8W



ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ : ขท.2235/2563

บริษัท สยามเมดิคอล อิมพอร์ต จำกัด
จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ ทุกรุ่น

คำเตือน

1. ผู้ที่จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะหาปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต กรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน
3. เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ประกายไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซในเครื่องออกไซด์เพื่อใช้ในการผสมยา
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้ซึ่งสูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้กับตัวเครื่องขณะที่มีการเปิดใช้งาน

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่น 7F-8W	1	เครื่อง
2. ชุดกระบอกน้ำทำความชื้น	1	ชุด
3. สายให้ออกซิเจนทางจมูก	1	เส้น
4. ไส้กรองเครื่องผลิตออกซิเจน	1	ชิ้น
5. ชุดหน้ากากให้ออกซิเจน	1	ชุด
6. อุปกรณ์พ่นละอองยา	1	ชุด
7. คู่มือ	1	ชุด

คำแนะนำ

ควรมีท่อออกซิเจนสำรอง ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ควรดูแลทำความสะอาดบริเวณที่เครื่องติดตั้งอยู่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือฝุ่นเยอะ
ควรพักเครื่อง 20 - 30 นาที ทุกการใช้งานครบ 22 - 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการถนอมเครื่อง
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้