

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร YUWELL 7F-10W

YUWELL 7F-10W



ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: ขพ.2235/2563

บริษัท สยามเมดิคอล อิมพอร์ต จำกัด
จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ ทุกรุ่น

คำเตือน

1. ผู้ที่จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้ปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต กรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งาน

3. เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ประกายไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซในถังสออกไซด์เพื่อใช้ในการผสมยาสูบ
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้กับตัวเครื่องขณะที่มีการเปิดใช้งาน

คุณสมบัติ

1. ขนาดเครื่องผลิตออกซิเจน 44.5*37.2*68 ซม. น้ำหนัก 33 กิโลกรัม
2. มีหน้าจอแสดงเวลาการทำงานของตัวเครื่อง
3. ช่วงอัตราการไหล 1-10 ลิตรต่อนาที
4. ความเข้มข้นออกซิเจน 90%+ และแรงดันสูงสุด 45-4.5 kPa
5. เครื่องผลิตออกซิเจนมีกลไกการลดความดันที่ 250 KPa +- 25 KPa
6. สามารถใช้ได้ถึงระดับสูง 1828 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยไม่ทำให้ระดับความเข้มข้นลดลง
7. ความดังขณะทำงาน 60 เดซิเบล
8. ใช้ไฟฟ้า (ไฟบ้าน) 220V 50Hz กำลังไฟเข้าไม่เกิน 350 VA
9. มี Exceed press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
10. มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า และความดันต่ำหรือความดันสูง
11. คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์ และตัวเครื่องผลิตออกซิเจน

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่น 7F-10W	1	เครื่อง
ชุดกระบอกน้ำทำความชื้น	1	ชุด
สายให้ออกซิเจนทางจมูก	1	เส้น
ไส้กรองเครื่องผลิตออกซิเจน	1	ชิ้น
ชุดหน้ากากให้ออกซิเจน	1	ชุด
อุปกรณ์ฟั่นละอองยา	1	ชุด
คู่มือ	1	ชุด

วิธีการดูแลรักษา

1. ทำความสะอาดไส้กรอง ทุก 1 เดือน หรือเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
2. ควรเปลี่ยนน้ำในกระบอกให้ความชื้นทุกวัน
3. ควรใส่น้ำสะอาดที่ผ่านการต้ม หรือน้ำกลั่นทางการแพทย์ในกระบอกให้ความชื้น
4. ดูแลความสะอาดปลายท่อที่ต่อเข้ากับกระปุกให้ความชื้น
5. ควรทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่อง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. ควรตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่โล่ง, ที่ให้ลมผ่านสะดวก และควรวางห่างจากกำแพง อย่างน้อย 1 ฟุต
7. การเปิดปิดเครื่องแต่ละครั้ง ควรเว้นระยะเวลาให้เครื่องเซ็ตอัฟอย่างน้อย 5 นาที
8. หลีกเลี่ยงการวางหรือติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่น หรือมลพิษเยอะ
9. การใช้งานสามารถใช้ต่อเนื่องได้ 22 - 24 ชั่วโมง ควรพัก 20-30 นาที

คำแนะนำ

ควรมีท่อออกซิเจนสำรอง ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ควรดูแลความสะอาดบริเวณที่เครื่องติดตั้งอยู่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง หรือฝุ่นเยอะ
ควรพักเครื่อง 20 - 30 นาที ทุกการใช้งานครบ 22 - 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการถนอมเครื่อง
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้